



氢氧机说明书

Oxyhydrogen Generator Introduction



适用型号: SOL-H-001

感谢您购买本公司的产品。使用前，请仔细阅读说明书，并妥善保管。

本设备需要使用指定瓶装纯净水、蒸馏水、去离子水，
严禁使用自来水、矿泉水和自有净水器过滤后的水。

目 录

工作原理

纯水电解制氢氧是把满足要求的电解水 (电阻率 > 1MΩ / cm) 送入电解槽阳极室, 通电后水便立刻在阳极分解: $2H_2O = 4H^+ + 2O_2$, 分解成负氧离子 (O^{2-}), 随即在阳极放出电子, 形成氧气 (O_2), 从阳极室排出, 携带部分水进入电解槽, 水可循环使用, 氧气从水槽上盖小孔从氧气出口输出。氢质子以水合离子 ($H^+ + XH_2O$) 的形式, 在电场力的作用下, 通过 SPE 离子膜, 到达阴极吸收电子形成氢气, 从阴极室排出后, 进入水分离器, 在此除去从电解槽携带出的大部分水分, 含微量水分的氢气从氢气口输出。

开箱检查	01
配件清单	01
安全注意须知	02
使用须知	03
控制面板示意图	04
操作说明	05
鼻导管使用说明	06
排水说明	06
规格参数	07
异常现象排查	08


开箱检查

用户在开箱后，使用产品前，请首先阅读本机使用说明书，再检查产品外观是否完好。



配件清单

为了您能顺利的使用本机，请在安装前确认如下配件，如有缺少，请向本公司或专卖店咨询。

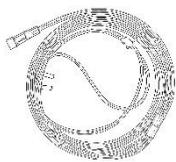

鼻导管 1 套



遥控 1 个



说明书 1 本



电源线 1 根

安全注意须知

远离火源

使用时禁止吸烟或使用明火，以免发生危险。



禁止堵住出气口

产品工作时，所有出气口必须保持通畅。不要堵塞出气口或过度扭曲吸气管。



禁止倒置横卧

产品运输过程中，禁止倒置横卧。停用 时，请及时排、换水。如需搬运 请将水箱内存水放空。以免造成机 器损坏。



禁止不插吸管工作

必须在断电的情况下插拔吸管，禁 止 在没有插好整条吸管的情况 下 开启制 氢氧工作、触摸出气口。避 免因人体静 电可能导致的火灾等 事故。



通风

产品应放置于室内通风处，并避免 阳光 直射。



水质要求为纯净水或蒸馏水

如加其它水或矿泉水，造成机器损 坏，自行承担损失。常用怡宝水或者 娃哈哈纯净水。



远离火源

不要在产品上放置物体，特别是液 体。



禁止私自修理、拆卸



使用须知

电源

产品不使用时请关闭电源，并拔下电源插头。



机器中有水露

新收到机器中有水露的说明：每台机器在出厂前都会进行加水测试，因此机器中会残留水，如果新收到机器出现水露的情况，这是正常现象。



加水须知

产品使用时，先插上电源，打开电源开关，机器面板缺水红灯显示，打开水箱盖对准水箱口加水，当水位达到最高水位线停止加水，为防止水流入机箱内部，忌满水操作，以防损坏机器。



插座要求

使用的插座额定功率不得小于产品的最大功率，插座必须确认接地良好。



换水

建议：长期不用或经常使用，均需 15 天换水一次。




通风散热

注意机器两侧保持空间散热。如机器温度超过设定温度，需停机散热后再继续使用。



操控面板示意图

- 过热：氢氧机设备内腔温度超高后会变红灯，设备自动停止运行。
- TDS：实时检测水质，水质不干净会亮红灯，并语音播报“请换水”。
- 缺水：设备运行所需水源不足时，亮红灯并语音播报“水箱缺水”。
- 失衡：设备严重倾斜时亮红灯。
- 1小时/2小时/3小时/4小时：吸氢氧时间的选定；设备运行时会有水流声，可再次点击按键关闭水流声。
- 开关：设备启动/关闭。
- 主界面：显示疗程时间（倒计时）。

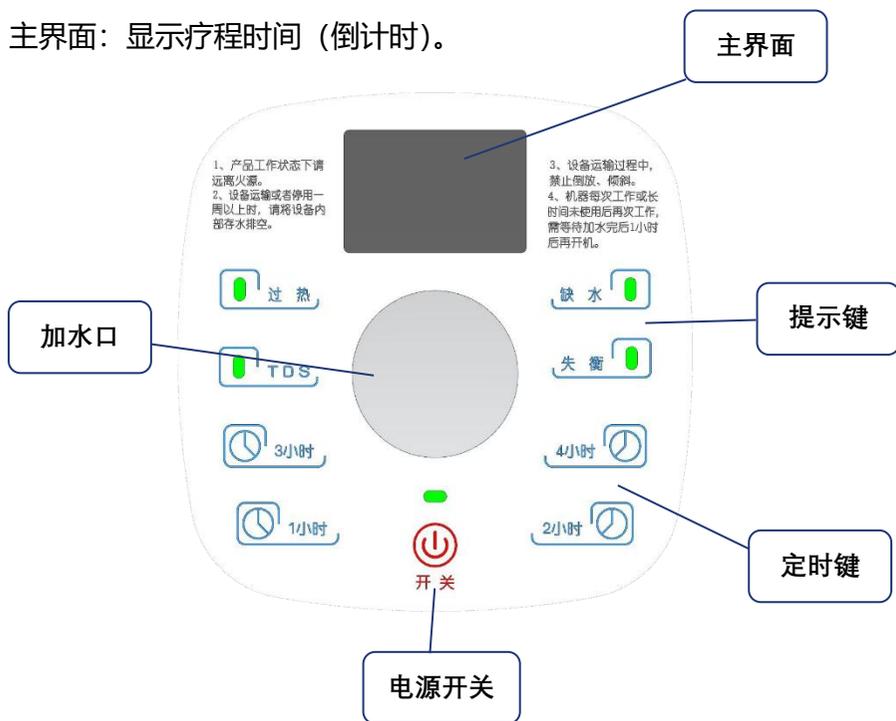

操作说明

1、购买怡宝/娃哈哈纯净水。

首先购买怡宝牌纯净水，需要 1.5 至 2

升。提示：机器工作需要没有离子水，怡宝纯净

水离子是 0。如加其它水或矿泉水造成机器损坏，

请自行承担损失。

2、首次使用，拧开加水塞加入纯净水达到指定水

位。注意请缓慢加水，避免加水过快过满以防溢出。加水完成后拧回水箱盖。

新机首次加水后，请等待一个小时后再通电开机，避免干烧。

3、先插好鼻吸管，插入电源线，进入待机状态。

4、开机使用。轻触“开关”键启动控制板，

选择工作时长，机器启动开始制氢氧。有 4 种

工作时长可以选择，界面计时为倒计时。记得

佩戴好鼻息面罩哦！

加水口

旋转开关



鼻吸管

电源线



鼻导管使用说明

使用方法

操作步骤简单，使用方便

1



鼻氧管吸氧头出口完全入鼻孔，胶管左右同时往上提，绕过耳朵挂住。

2



卡扣向上滑，锁紧鼻氧管
卡扣向下滑，松开鼻氧管
松紧由个人舒适度决定。

可拆卸型

可更换头套鼻吸

分解图



排水说明

- 1.先找一个容器装水
- 2.拔出氢氧机背面底部出水口的橡胶塞
- 3.水排干净后再从加水口倒入纯净水



排水口

规格参数

项 目	规 格
产品名称	氢氧机
产品型号	SOL-H-001
氢氧流量 (ml/min)	450
额定功率(W)	150w
净重 (kg)	4.3kg
注水要求	纯净水(水的电阻率 $\geq 1\text{MQ/cm}$)
额定电压	220V
外形尺寸 (mm)	285*270*295mm
执行标准	

异常现象排查

异常现象	检查要点及排除
“过热”灯亮，停止工作	循环系统出现问题，电解槽供水水泵故障引起“干烧”
	检查散热风扇是否正常工作
	设备长时间运行，导致温度过高
	设备功率偏高，导致温度过高
“TDS”灯亮，停止工作	设备现有水质不干净，需要排空重新更换纯净水
“缺水”灯亮，停止工作	水箱内水位太低，请添加纯净水
加水口溢水	水箱内水位太高，请用排水口适当排点水
工作过程中感觉不到气体排除	查看鼻导管整根气管是否有对折或压住
	先准备一杯纯净水，将鼻息管放入水位下，查看是否有气泡产出，有则证明有气流，如无气泡我们继续下一步排查

产品保修卡（正本）

客户姓名		地址	
		电话	
购买日期		购买商场	
购买机型			
维修记录			
日期	维修记录		修理员

非常感谢您选择本公司的产品。请在使用前认真阅读《产品使用说明书》和本《保修条例》。凡在中华人民共和国购买的，属于本公司生产和经销的产品，自购买之日起两年之内，因产品质量原因造成的故障，均适用于本《保修条例》。

- 1.产品执行国家“三包规定”。
- 2.用户购机后，应及时填写本保修卡，凡经涂改、剪贴或严重污染的保修卡，均属无效。
- 3.为了保障您的合法权益，请您仔细核对保修卡上内容填写的准确性。
- 4.保修时，请完整填写保修卡内容。
- 5.机器返厂前，用户必须将水箱内的水排尽，然后进行完善的包装防护。因裸机造成运输过程中的损伤由客户自行承担。
- 6.非本公司生产的部品由该产品的生产厂家提供保修服务。
7. 非质量原因的机器耗材不可进行更换、退货。
- 8.以下情况不属于保修范围：
 - (1)未按产品使用说明书的要求使用、维护。
 - (2)因自然灾害等不可抗拒因素(如地震、火灾、雷击)等原因造成的故障。
 - (3)产品已经超过保修期。
 - (4)非本公司授权服务机构人员安装、修理、更改、拆卸、输入不合适的电压、机器内部进入异物（水或其他物品）等原因造成机器故障。
 - (5)使用非本公司提供的零配件导致机器发生故障。
 - (6)自选购件或辅助装置。
- 9.本保修卡的解释权归本公司所有。



公司：浙江生命之帆大健康科技有限责任公司

售后地址：浙江省建德市三都镇工业功能区

网址：<http://www.zjsmfz.com> 售后电话：13067770820

产品保修卡（副本）

客户姓名		地址			
		电话			
购买日期		购买商场	订单编号		
购买机型					



生命之帆
- SAIL OF LIFE -



微信公众号

浙江生命之帆大健康科技有限责任公司

Zhejiang Lifesail Health Technology Co., Ltd.

地址：浙江省建德市新安江街道半岛国际

网址：<http://www.zjsmzf.com> 售后电话：13067770820